


VOCATEXT

Une vidéo-loupe parlante

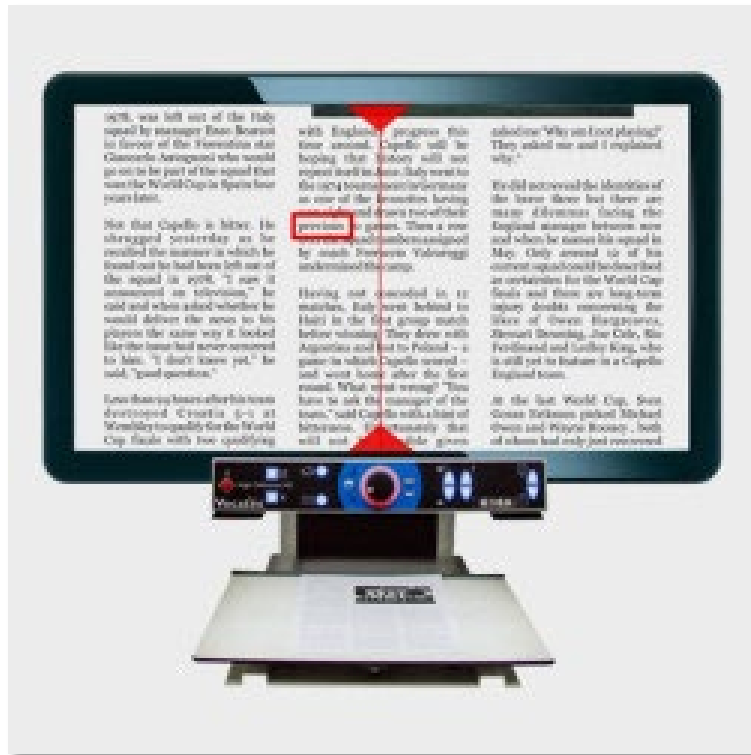

Un appareil Vocatext Plus, développé par Koba Vision, se trouve à la **Bibliothèque du Campus Centre** de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), au niveau de la Dalle, **juste à gauche de l'entrée de la salle de lecture principale, près du bureau de renseignement.**

Il est à la disposition des usagers, sur demande auprès du personnel d'accueil présent. Les lecteurs de toutes les bibliothèques de l'UPEC peuvent bénéficier de ce service, s'ils peuvent se déplacer sur ce site.

Ce mode d'emploi simplifié a été créé en 2023 par le Service commun de la documentation (SCD) de l'UPEC.

Table des matières

À quoi sert l'appareil Vocatext ?.....	3
Tableau de boutons	3
Commencer	4
Agrandir le texte	5
Régler l'affichage en fonction de vos besoins	5
Bouton 3	5
Bouton 4.....	6
Bouton 5.....	6
Écouter le texte : démarrer, mettre en pause, reprendre	7
Écouter le texte : régler le volume, la langue et la voix, la vitesse.....	7
Écouter le texte : naviguer dans le texte	8
Écouter le texte : sélectionner une colonne.....	9
Utiliser la règle de lecture.....	10
Plus de détails.....	11

À quoi sert l'appareil Vocatex ?


L'appareil Vocatex est une **vidéo-loupe parlante** pour les personnes en situation de **handicap visuel**.

Posez un **document papier** sur la tablette, la page apparaît **à l'écran**.

Vous pouvez

- agrandir le texte
- modifier l'éclairage et les couleurs
- écouter le texte dans différentes langues

Tableau de boutons

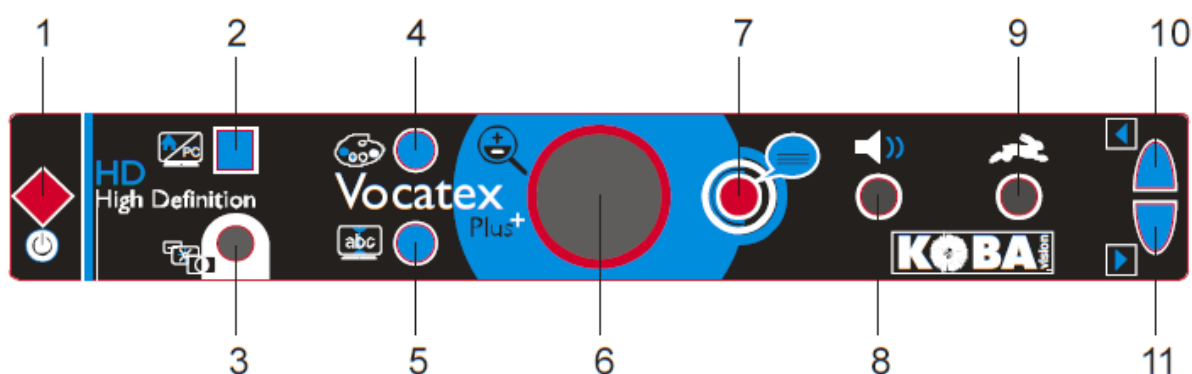

Un tableau de **gros boutons** permet d'accéder aux principales fonctions de l'appareil. Sur la **gauche** du tableau, les boutons concernent principalement la **vidéo-loupe**. Sur la **droite** du tableau, les boutons concernent la **machine à lire**.

Des **messages vocaux** sont associés aux boutons de commande (par exemple, « plus fort »).

Commencer

Allumez l'écran grâce au bouton situé sur le côté droit de l'écran.




Allumez aussi la vidéo-loupe grâce au bouton 1. C'est le bouton le plus à gauche du tableau. Il a la forme d'un losange de couleur rouge, associé au symbole ON OFF qu'on retrouve sur les télévisions et les ordinateurs.



Posez un livre ou un journal sur la tablette située sous l'écran. La tablette coulisse devant et derrière, de gauche et de droite. Vous pouvez aussi la bloquer avec la manette située en-dessous.

Branchez un casque audio sur la gauche de l'écran.

Agrandir le texte

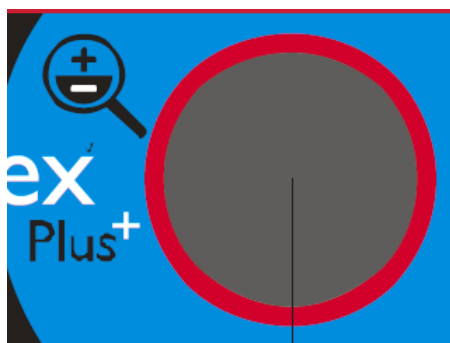

Vous avez besoin du **bouton 6**. C'est le plus gros bouton. Il est situé au milieu du tableau. C'est un rond gris cerclé de rouge sur fond bleu. Il est associé à une loupe sur laquelle sont dessinés les signes plus et moins.

Pour diminuer la taille du texte affiché à l'écran, tournez le bouton 6 vers la gauche.

Pour agrandir la taille du texte affiché à l'écran, tournez le bouton 6 vers la droite.

Régler l'affichage en fonction de vos besoins

Bouton 3



Le bouton 3 est le deuxième à partir de la gauche, sur la partie basse du tableau. C'est un rond gris, sur fond blanc. Il est associé à trois cadres superposés représentant un disque noir et blanc, un soleil et une ligne.

- En mode couleur : luminosité
- En lecture en positif ou négatif : amélioration de l'arrière-plan

Bouton 4



Le bouton 4 est le troisième à partir de la gauche, sur la partie haute du tableau. C'est un rond bleu, associé à une palette de couleurs de peintre.

- Pression brève : changement de couleurs, lecture en négatif ou positif
- Pression longue : changement d'arrière-plan ou changement de couleurs de police


Bouton 5



Le bouton 5 est le troisième à partir de la gauche, sur la partie basse du tableau. C'est un rond bleu. Il est associé à un écran affichant les lettres abc, une barre verticale au milieu.

- Pression brève : sélecteur de colonne visible ou invisible
- Pression longue : adapter la couleur du sélecteur de colonne

Écouter le texte : démarrer, mettre en pause, reprendre

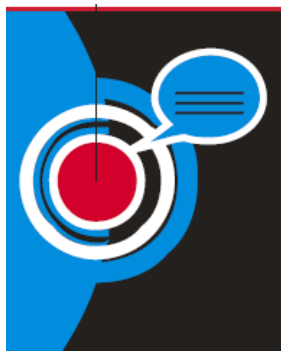

Pour démarrer la lecture, la mettre en pause ou la reprendre, appuyez sur le bouton 7.

C'est le premier bouton situé sur la droite du gros bouton central. C'est un rond rouge. Il est associé à une bulle de bande dessinée avec trois lignes horizontales représentant du texte lu.

Écouter le texte : régler le volume, la langue et la voix, la vitesse

- Réglez le volume en tournant le bouton 8. C'est le deuxième bouton situé sur la droite du gros bouton central. C'est un rond gris. Il est associé à un haut-parleur.



- Choisissez une autre langue et une autre voix en maintenant la pression sur le même bouton 8 tout en tournant d'un cran. Un message vocal indique la langue et le locuteur (par exemple, « français Audrey »).


- Réglez la **vitesse de lecture** grâce au **bouton 9**. C'est le troisième bouton sur la droite du gros bouton central. C'est un rond gris. Il est associé à un lapin.



Écouter le texte : naviguer dans le texte

Pour naviguer dans le texte, utilisez les boutons 10 et 11. Ces boutons sont situés l'un au-dessus de l'autre, à l'extrémité droite du tableau. Ils sont de couleur bleue et de forme semi-ovale. Ils sont associés à des flèches vers la gauche et vers la droite.

Le **bouton 10**, sur la partie haute du tableau, sert à **reculer**. Le **bouton 11**, sur la partie basse du tableau, sert à **avancer**.

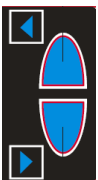

- Pression brève : un mot
- Pression longue : une phrase

Écouter le texte : sélectionner une colonne

Si vous lisez une page comportant plusieurs colonnes, faites apparaître le sélecteur de colonne en appuyant sur le bouton 5 et positionnez la barre verticale à l'endroit souhaité.


Le bouton 5 est le troisième à partir de la gauche, sur la partie basse du tableau. C'est un rond bleu. Il est associé à un écran affichant les lettres abc, une barre verticale au milieu.



Pour lire la suite du texte sans interruption, vous pouvez déplacer le document sur la tablette ou faire coulisser la tablette.



Utiliser la règle de lecture

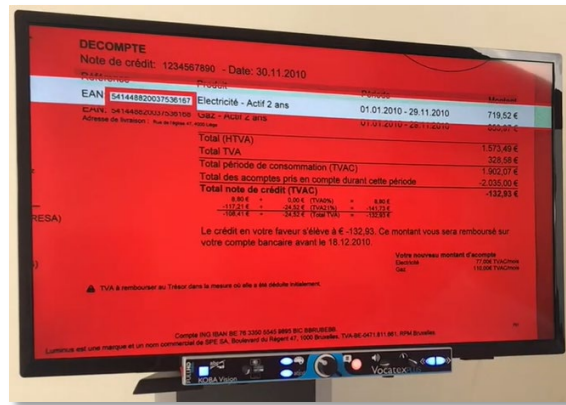

La règle de lecture permet d'encadrer un bandeau horizontal de l'écran en masquant en partie le reste du texte.

- Appuyez sur le **bouton 3** pour la faire apparaître. Le bouton 3 est le deuxième à partir de la gauche, sur la partie basse du tableau. C'est un rond gris, sur fond blanc. Il est associé à trois cadres superposés représentant un disque noir et blanc, un soleil et une ligne.



- Faites les réglages de couleur selon vos besoins.
- **Démarrez la lecture de gauche à droite** grâce au **bouton 7**. C'est le premier bouton situé sur la droite du gros bouton central. C'est un rond rouge. Il est associé à une bulle de bande dessinée avec trois lignes horizontales représentant du texte lu.



Plus de détails

Nous vous invitons à

- Consulter le **mode d'emploi complet du fabricant** : une version imprimée est disponible au bureau de renseignement
- Regarder une [vidéo réalisée par KOBA Vision](#)
- **Demander conseil au personnel d'accueil**

Bonne lecture !